



Tutore AFO per piede equino (ciondolante).

Matrix Spiral

Art. FH280

**La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Adatto per un livello di attività fisica giornaliera medio alto e nel caso di patologie bilaterali. Il tutore è realizzato con uno speciale materiale che combina le proprietà del carbonio e della fibra di vetro. Tale materiale, anche dopo continui cicli di carico, non subisce deformazioni permanenti e pertanto svolge la propria funzione per tutta la vita. Il risultato è un tutore leggero, dal design innovativo e con l'equilibrio giusto tra rigidità e flessibilità, tale da assicurare la giusta spinta nelle attività giornaliere. Adatto per ogni paziente senza limiti di peso.

CARATTERISTICHE

Struttura e sostegno plantare in materiale composito.
Struttura laterale anteriore al malleolo.
Design aperto sul malleolo.
Chiusura a velcro.
Se strettamente necessario, modificabile a caldo.

INDICAZIONI

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE A SEGUITO DI DANNI NEUROLOGICI • DANNI AL NERVO PERONEALE

APPLICAZIONE

- 1 Infilare il tutore nella scarpa
- 2 Indossare la scarpa con il tutore e avvolgere la struttura laterale intorno alla gamba
- 3 Avvolgere l'imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino a velcro.

Se necessario, la protezione anteriore può essere modificata tramite fresatura. Il plantare metallico può essere modificato attraverso fresatura se strettamente necessario.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.
Non correre con indosso il dispositivo. Non eseguire piegamenti ripetuti delle ginocchia.
Non salire sulle scale con il dispositivo indossato. Prestare attenzione a non caricare il dispositivo sulle punte eccessivamente e per periodi prolungati. Non indossare il dispositivo a piedi nudi. Non indossare con scarponcini.
Prestare attenzione nel caso il paziente soffra di diabete. In questo caso assicurarsi che il dispositivo non causi pressioni eccessive che possano portare a dolori o ulcere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

