



Collare cervicale tipo "Philadelphia".

PHILL

Art. TO0301

**La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico ideale per stabilizzare il tratto cervicale. La struttura rigida e la forma anatomica del plastazote agevolano il rilassamento della muscolatura cervicale, garantendo stabilizzazione e benessere a tutta la zona trattata. I fori d'aerazione permettono la giusta traspirazione. Leggero, confortevole e facile da indossare, non compromette in alcun modo la respirazione e la circolazione sanguigna.

CARATTERISTICHE

Struttura bivalva rigida in kydex e semirigida in plastazote.
Atossico e ipoallergenico.
Chiusure laterali a velcro.
Radiotrasparente.

INDICAZIONI

DISTORSIONI DELLA COLONNA CERVICALE
(COLPO DI FRUSTA) • TORCICOLLO • DISCOPATIE • CEDIMENTI DA METASTASI
ARTROSI CERVICALE • CRISI VERTIGINOSE DI ORIGINE CERVICALE •
POST-OPERATORIO • UTILE IN CASO DI TRACHEOTOMIA

APPLICAZIONE

1. Applicare la parte con la scritta "BACK" sul collo posteriormente
2. Applicare la parte con la scritta "FRONT" e adagiare il mento sulla porzione appositamente conformata. Sormontare le parti laterali più spesse a quelle più fini della parte posteriore.
3. Chiudere il collare con i velcri posteriori, tirando quanto basta

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960
Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com
info@tenortho.com

Presenza di marcatura CE, che attesta
la conformità alla direttiva europea
93/42/CEE.

Emissione in data 01 - 12 - 2016
Revisione 1

