



Corsetto dorsale raddrizzaspalle

BAND-UP

Art. TO1100

**La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, funzionale e dinamico che estende e corregge la colonna vertebrale. Le spinte di sostegno a livello dorsale, sono studiate appositamente per sostenere il rachide dorsale, mantenendolo in una posizione fisiologicamente naturale, senza minimamente compromettere la normale respirazione.

Il peso molto ridotto e i tiranti elastici di chiusura, garantiscono un adattamento anatomicamente perfetto. Di facile applicazione, risulta poco visibile e garantisce inoltre un'ottimale vestibilità.

CARATTERISTICHE

Tessuto elastico millerighe. Stecche dorsali di sostegno. Spallacci con imbottitura ascellare ed incrocio posteriore. Chiusura anteriore a velcro. Unisex.

INDICAZIONI

UTILE NELLA CORREZIONE DI ATTEGGIAMENTI CIFOTICI, DORSO CURVO E SCAPOLE ALATE • COADIUVANTE DORSALGIE POSTURALI PREVENZIONE IN OSTEOPOROSI

APPLICAZIONE

1. Applicare il dispositivo al paziente in posizione eretta.
2. Tenere la parte alta posizionata parallelamente alla linea delle spalle e ben centrata sulla colonna vertebrale.
3. Far passare gli spallacci imbottiti sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente ed infine fissarli sul velcro centrale anteriore.
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato .

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L' applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.

Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione.

Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960
Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com
info@tenortho.com

Presenza di marcatura CE, che attesta
la conformità alla direttiva europea
93/42/CEE.

Emissione in data 01 - 12 - 2016
Revisione 1

