

TENORTHO

Get back in action

Corsetto muscolo-scheletrico sacroiliaco in fibra di carbonio

AGILOMB®

ART. TO1106

La cura della schiena in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere.

Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con fibra di carbonio C6Tex (esclusiva TENORTHO) elastico e 100% traspirante garantisce un'ottima vestibilità e nello stesso tempo stabilità alla colonna vertebrale.

Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di lievi patologie che interessano il tratto lombare e lombosacrale.

Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

- Materiale "C6Tex combinato", Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare).

- Chiusura anteriore a velcro.

- Tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata.

- Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia.

- Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

INDICAZIONI

Dopo evento traumatico diretto su un fianco destro o sinistro • eccessivi sforzi in flessione/torsione del tronco • cattivo riallineamento del bacino dopo il parto • post interventi chirurgici • posture scorrette prolungate • sindrome comune della zona sacro iliaca • artrosi • instabilità articolare • blocco articolare • mialgia e tendinopatia nella regione pelvica • instabilità dell'anello pelvico • disturbo strutturale dopo fusione spinale lombare • per la profilassi delle forme recidivanti di blocchi articolari e miotendinopatia (m. retto addominale, m. piriforme adduttore) • rottura della sinfisi pubica e relax • alleviamento dolore causato da lunghi periodi di tempo in posizione seduta o in piedi • fornire maggiore stabilità per il movimento nella vita quotidiana.

APPLICAZIONE

1 Aprire il corsetto completamente tenendo l'asola per il pollice verso l'alto. (fig. 1)

2 Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali obliqui "piccoli").

3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui. (fig. 2)

4 Indossare il corsetto e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo

correttamente. (fig.2)

5 Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente. (fig.3)

6 Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà dei glutei.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

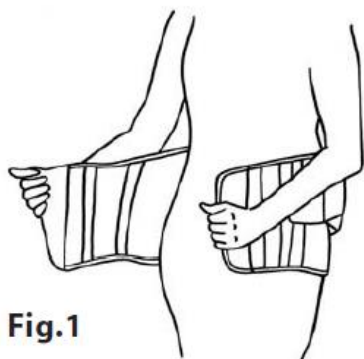


Fig.1



Fig.2

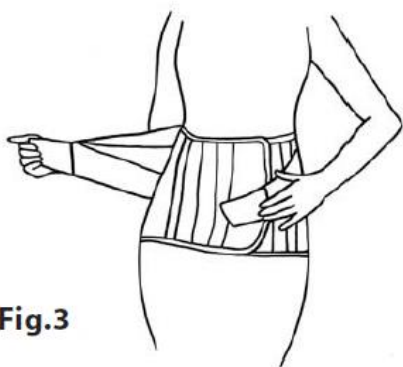


Fig.3

GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.

Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione.

Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificativo e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.