



# TENORTHO

Get back in action

Corsetto Lombare per addome prominente con fibra di carbonio.

**AGILOMB®**

**ART. TO1108**

**La cura della schiena in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole**

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere.

Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con fibra di carbonio C6Tex (esclusiva TENORTHO) elastico e 100% traspirante garantisce un'ottima vestibilità e nello stesso tempo stabilità alla colonna vertebrale.

Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di lievi patologie che interessano il tratto lombare e lombosacrale.

Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

#### CARATTERISTICHE

-Materiale "C6Tex combinato", Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare).

- Chiusura laterale a velcro per ottimizzare l'azione contenitiva nella parte frontale.

-Tiranti elastici posteriori (2+2) per una pressione variabile e personalizzata, inclinati per la maggiore azione contenitiva.

-Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia.

-Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.

#### INDICAZIONI

OSTEOPOROSI, OSTEOMALACIA, CIFOSI DORSALE, OSTEOLISI, ESITI DI FRATTURE VERTEBRALI DEL TRATTO DORSO-LOMBARE, LOMBALGIE, LOMBOSCIATALGIE, LOMBOSACRALGIE, TRAUMI LIEVI DELLA COLONNA LOMBARE, CONTRATTURE MUSCOLARI PARAVERTEBRALI LOMBARI, SPONDILO ARTROSI, DISCO PATIE, CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI, ATTEGGIAMENTI IPERLORDOTICI LOMBARI DOVUTI A TENSIONE ADDOMINALE, PTOSI E CEDIMENTI ADDOMINALI DA LAPAROTOMIA E SVENTRAMENTI DI MODESTA ENTITÀ.

#### APPLICAZIONE

1) Aprire il corsetto completamente

2) Zona anteriore costituita da n°6 velcri (1 addominale "basso", 3 addominali "piccoli", 2 laterali "obliqui piccoli")

3) Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui.

4) Indossare il corsetto tenendo le dita della mano destra nell'apposita asola della patella superiore.

5) Chiudere la prima patella superiore sul velcro addominale/laterale in modo che la sagoma del corsetto

sia centrata sull'addome. In questo modo la chiusura rimane laterale.

6) Chiudere la seconda patella inferiore tenendo le dita della mano destra nell'apposita asola

7) Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere i velcri addominali e fissarli

8) Dei 4 tiranti, agganciare prima gli inferiori sul velcro addominale "basso" e successivamente i superiori in alto su 2 dei 3 velcri addominali "piccoli"

9) Per il corretto posizionamento, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà glutei.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di

altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

#### **GARANZIA**

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.