

Tutore Lombare Modulare.

TENY-SHORT

Art. TO1305

**La cura della schiena in tutta sicurezza,
leggera e confortevole**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere. Doppia azione: telaio in alluminio per fase acuta o stecche per fase cronica (intercambiabili).

Materiale "C6Tex combinato" con filo di carbonio: traspirante, termoregolatore, batteriostatico, ipoallergenico e performante.

Il peso molto ridotto del telaio e gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di patologie che interessano il tratto lombare e lombosacrale.

Facile da indossare, vestibilità impercettibile, assicura il corretto sostegno alla schiena, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane

CARATTERISTICHE

- Telaio in lega di alluminio leggero adattabile ed anatomico;
- L'integrazione di tasche posteriori per l'alloggiamento di stecche lombari permette la modulazione dell'intensità del sostegno.
- Materiale "C6Tex combinato", Antistatico (Le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante e Termoregolatore; Batteriostatico e Ipoallergenico; Performante (durante l'attività fisica diminuisce la concentrazione di acido lattico, migliorando la circolazione sanguigna e l'ossigenazione cellulare).
- Chiusura anteriore a velcro e tiranti elastici posteriori per una pressione variabile e personalizzata

INDICAZIONI

OSTEOPOROSI • CEDIMENTI VERTEBRALI LOMBARI SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA • ARTROSI LOMBARE • IPERLORDOSI • FRATTURE VERTEBRALI DEL TRATTO LOMBARE DI MODERATA ENTITA'.

APPLICAZIONE

1. Dopo aver scelto la taglia inerente le misure del paziente, se necessario procedere alla modifica del telaio in alluminio (o delle stecche lombari) per migliorare l'anatomicità.
2. Aprire il corsetto completamente tenendo l'asola per il pollice verso l'alto. (fig. 1)
3. Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali obliqui "piccoli").
4. Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sui velcri laterali obliqui. (fig. 2)
5. Indossare il corsetto e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo correttamente (fig.2)
6. Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente (fig.3)
7. Per il corretto posizionamento assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto sia posizionato a metà dei glutei.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

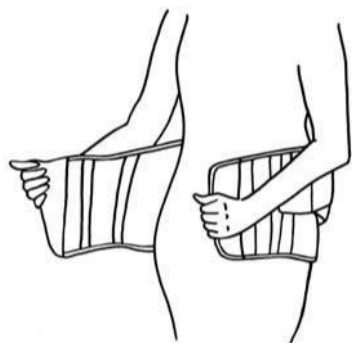


Figura 1



Figura 2

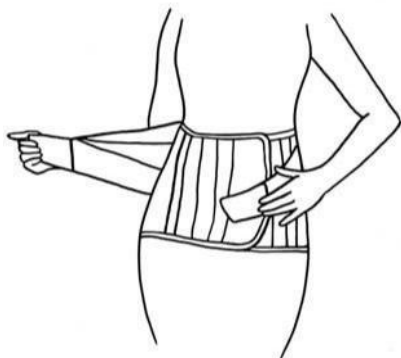


Figura 3



GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.

Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione.

Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960
Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com
info@tenortho.com



Presenza di marcatura CE, che attesta
la conformità alla direttiva europea
93/42/CEE.
Emissione in data 01 - 12 - 2016
Revisione 1