



# TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi

**Corsetto dorso-lombare modulare.**

**TAG+ art. TO1310**

**La cura della schiena in tutta sicurezza.**

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con membrana in grafene garantisce semi rigidità. Gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di patologie che interessano il tratto dorsolombare. Facile da indossare, assicura il corretto sostegno alla schiena e procura benessere e sollievo.

#### CARATTERISTICHE

Materiale con membrana in grafene, antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); Traspirante; Batteriostatico e Ipoallergenico; performante e Termoregolatore. Chiusura anteriore a velcro. Sistema di tiranti elastici posteriori, posizionati a forma di rombo per seguire la muscolatura della schiena, che converge in un unico tirante per una pressione variabile e personalizzata. Struttura interna rigida realizzata in alluminio garantisce un ottimo sostegno della schiena. L'integrazione di tasche posteriori per l'alloggiamento di stecche dorsali permette la modulazione dell'intensità del sostegno. Spallacci al contrario per consentire una maggiore spinta antero posteriore delle spalle e il raddrizzamento della schiena in posizione eretta.

#### INDICAZIONI

SINDROME DI PISA (10% di pazienti con Parkinson) • FRATTURE TRAUMATICHE • OSTEOPOROSI • CEDIMENTI VERTEBRALI • OSTEOMALACIE FRATTUROSE • ARTROSI • IPERCIFOSI DORSALE • CEDIMENTI VERTEBRALI DORSALI E AL PASSAGGIO DORSO LOMBARE SU BASE OSTEOPOROTICA O METASTATICA

#### APPLICAZIONE

- 1 Aprire il corsetto completamente.
- 2 Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali "piccoli").
- 3 Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sul vellutino laterale.
- 4 Indossare il corsetto e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo correttamente
- 5 Prendere i velcri dei tiranti e trazionare fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente.
- 6 Per applicarlo correttamente, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà glutei
- 7 Far passare le spalline sotto le ascelle, quindi sopra le spalle, incrociarli posteriormente ed infine fissarli sul velcro dei tiranti superiori/anteriori.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiore o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.  
Emissione in data 06/06/19  
Rev 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Trento e Trieste 100, 20853 Biassono (MB)  
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689  
[www.tenortho.com](http://www.tenortho.com) – [info@tenortho.com](mailto:info@tenortho.com)