

Immobilizzatore di clavicola

**OTTONE**

**ART. 2100**

**La cura del corpo in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole.**

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Stabilizza perfettamente la zona interessata senza gravare sulla mobilità del resto del corpo. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto traspirante imbottito.  
Chiusura a velcro posteriore.

#### INDICAZIONI

FRATTURA DELLA CLAVICOLA • SUBLUSSAZIONE DELL'ARTICOLAZIONE ACROMION-CLAVEARE.

#### APPLICAZIONE

- 1 Applicare il pad rettangolare con fibbia sul dorso (tra le scapole).
- 2 Portare i cinturini sotto le ascelle così da raggiungere i lati liberi della fibbia triangolare.
- 3 Girare i cinturini in velcro nella fibbia e tenderli fino a raggiungere l'immobilizzazione desiderata.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.



Emissione in data 27-04-2016  
Revisione 0

TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)  
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689  
[www.tenortho.com](http://www.tenortho.com) – [info@tenortho.com](mailto:info@tenortho.com)