

Immobilizzatore di spalla con tasca per gomito.

NOLUX II

ART. 2103

**La cura della spalla in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura caratterizzata da un reggi braccio in cotone al 100%, una fascia d'accoppiato con chiusura a velcro ed i tiranti regolabili ad ogni misura necessaria, permettono un'applicazione immediata evitando ulteriori complicazioni. La base imbottita, oltre a garantire il fissaggio delle cinghie mezzo velcro, fornisce un'ulteriore strumento di stabilizzazione. Facile da indossare, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto in cotone al 100%. Tasca per contenimento del gomito. Tiranti regolabili in lunghezza. Base in tessuto accoppiato per fissaggio tiranti ed una maggiore stabilità dell'articolazione.

Fascia in accoppiato con chiusura a velcro per stabilizzazione finale. Universale.

INDICAZIONI

FRATTURE COMPOSTE DELL'OMERO • DISTORSIONI DELLA SPALLA •
LUSSAZIONI GLENO-OMERALI • POST-OPERATORIO DELLE TENORRAFIE DEL
CAPO LUNGO DEL BICIPITE.

APPLICAZIONE

1. Infilare il braccio nella sacca.
2. Regolare i tiranti tramite le apposite fibbie scorrevoli.
3. Incrociarli posteriormente e portarli fino a raggiungere la base della tasca reggi braccio fissandoli all'imbottitura di base di colore blue.
4. Mantenere il braccio in una posizione di 90°.
5. Fissare la fascia in tessuto accoppiato bianco sulla porzione di velcro asola presente sulla sacca.
6. Concludere girando la fascia intorno al braccio da immobilizzare e fissandola su se stessa con l'apposito velcro di chiusura.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.



Emissione in data 27-04-2016
Revisione 0

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com