



Reggibraccio semplice

SOLLIEVO

ART. TO2109

**La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in cotone ed il tirante regolabile velocemente permettono un'applicazione immediata evitando ulteriori complicazioni. Facile da indossare, assicura l'aiuto necessario, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto in cotone.
Asola per pollice.
Fascia regolabile in lunghezza tramite fibbia.
Imbottitura di protezione.

INDICAZIONI

FRATTURA • CONTUSIONE • BORSITI • POST-OPERATORIO.

APPLICAZIONE

1. Infilare il braccio nella sacca.
2. Regolare la fascia fino a raggiungere un angolo di 90° tra avambraccio e omero.
3. Infilare la fascia nell'imbottitura e successivamente portarla a livello spalla/clavicola.
4. Se necessario, posizionare il pollice nell'apposita asola.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro.
L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.
Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.
Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità..

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.



Emissione in data 27-04-2016
Revisione 0

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com