



Polsiera semplice in moltoprene velcrabile.

EASY

ART. 2110

**La cura del polso in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. La struttura realizzata in moltoprene bifoderato e la chiusura a velcro, fanno di questo tutore la soluzione più semplice ed immediata alla cura dei traumi all'articolazione del polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, procurando benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Moltoprene ortopedico bifoderato.
Chiusura a velcro.
Universale.

INDICAZIONI

DISTORSIONI • INSTABILITA' ARTICOLARE • RIZOARTROSI • ARTROSI

APPLICAZIONE

1. Aprire la polsiera completamente
2. Infilare il pollice all'interno del "foro"
3. Avvolgere il tessuto intorno all'articolazione e fissare con il velcro di chiusura
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro.
L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere, devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.
Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.
Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità..

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.



Emissione in data 27-04-2016
Revisione 0

TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com