

# TENORTHO

Un punto fermo per tornare a muoversi



**Polsiera steccata in tessuto trasparente (28cm)**

**DRYPOL LONG**

Art. TO2207N

**La cura del polso in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole**

#### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto traspirante e i velcri di chiusura, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei traumi al polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

#### CARATTERISTICHE

Tessuto traspirante.

Chiusura a velcro e fibbie.

Stecche dorsali in acciaio armonico per migliorare l'immobilizzazione.

Stecca anatomica palmare in alluminio.

#### INDICAZIONI

DISTORSIONI • TENDINITI • ARTRITE REUMATOIDE • ARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA • FRATTURE COMPOSTE DELL'ESTREMITA' DEL RADIO E DELL'ULNA • SOSTITUTIVO DEL GESSO.

#### APPLICAZIONE

1 Aprire i velcri di chiusura ed allargare la polsiera.

2 Infilare il pollice nel foro e posizionare la zona concava (della stecca di alluminio) sul palmo della mano.

3 Fissare sequenzialmente i velcri di chiusura, iniziando dal polso.

4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto.

#### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

#### PRECAUZIONE D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

#### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data  
27 - 04 - 2016

Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)  
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689  
[www.tenortho.com](http://www.tenortho.com) – [info@tenortho.com](mailto:info@tenortho.com)