

Polsiera steccata in tessuto trasparente per bambini

DRYPOL BABY

Art. TO2209

La cura del polso in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto traspirante e i velcri di chiusura, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei traumi al polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria, e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto traspirante.

Chiusura a velcro e fibbie.

Stecche dorsali in acciaio armonico per migliorare l'immobilizzazione.

Stecca anatomica palmare in alluminio.

Supporto per l'immobilizzazione del pollice.

INDICAZIONI

DISTORSIONI • TENDINITI • POSTUMI DI FRATTURA • FRATTURE COMPOSTE DELL'ESTREMITA' DEL RADIO E DELL'ULNA.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i velcri di chiusura ed allargare la polsiera.
- 2 Infilare il pollice nel foro e posizionare la zona concava (della stecca di alluminio) sul palmo della mano.
- 3 Fissare sequenzialmente i velcri di chiusura, iniziando dal polso.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.