



Polsiera steccata in tessuto elastico

PF II

Art. TO2210

La cura del polso in tutta sicurezza, leggera e confortevole

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto elastico calibrato e i velcri di chiusura, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dei traumi del polso. Facile da indossare, ottima vestibilità, assicura l'immobilizzazione necessaria e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Tessuto elastico calibrato.

Chiusura a velcro.

Stecca anatomica in alluminio (modellabile).

Supporto in alluminio per l'immobilizzazione del pollice (modellabile)

INDICAZIONI

DISTORSIONI • TENDINITI • ARTRITE REUMATOIDE • ARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA •
ARTROSI DELL'ARTICOLAZIONE TRAPEZIO-METACARPALE • LESIONE DELLA FASCIA ULNARE
LATERALE

APPLICAZIONE

1. Aprire la polsiera completamente
2. Posizionare la zona concava sul palmo della mano a livello del pollice
3. Fissare sequenzialmente i velcri di chiusura, iniziando dal dorso della mano
4. Fissare il velcro intorno al pollice
5. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e sufficientemente stretto

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.

Asciugare lontano da fonti di calore.

Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.

Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONE D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.

Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.

Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento.

Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico.

Si consiglia l'uso personale del prodotto.

Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili.

Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.