



Ortesi a stivaletto per tibio-tarsica con R.O.M.

TB

Art. TO4300

**La cura del corpo in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. La struttura caratterizzata da materiali tecnici, resistenti e leggeri, garantiscono un'ottima tenuta latero-mediale. Inoltre oltre alla regolazione (R.O.M.) della flessione plantare e dorsale, è possibile, in via del tutto esclusiva, la regolazione longitudinale dei supporti laterali. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, di facile applicazione.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale composito leggero e resistente.
Regolazione altezza aste laterali da 35 cm a 42,5 cm.
Aste montanti per stabilizzazione latero/mediale con R.O.M.
Imbottitura traspirante, bifoderata in gomma schiuma divisa in due parti.
Imbottitura plantare in evazote atossica. Cinturini di chiusura a velcro.
Suola in gomma antiscivolo.

INDICAZIONI

ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE • TRATTAMENTO DELLE FRATTURE
MALLEOLARI • SOSTITUTIVO DEL GESSO • POST-OPERATORIO.

APPLICAZIONE (solo per tecnici e specialisti)

- 1 Aprire i cinturini a velcro di chiusura.
 - 2 Indossare le imbottiture, piede e gamba.
 - 3 Infilare la gamba all'interno della struttura.
 - 4 Stringere i cinturini di chiusura partendo da quello più basso (piede).
- * Se necessario, regolare la gradazione di flessione plantare e dorsale.
* Se necessario, regolare l'altezza delle aste laterali e modificarle leggermente così da seguire l'anatomia della gamba.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

*** solo per tecnico specializzato**