



Ortesi rigida a stivaletto per tibio-tarsica.

AGILE

Art. TO4301

**La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. La struttura caratterizzata da materiali plastici, resistenti e leggeri, garantiscono un'ottima tenuta latero-mediale. Inoltre oltre ai supporti laterali, il supporto viene assicurato dalla struttura scheletrica antero-posteriore (rimovibile se non necessaria).

Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, risulta di facile applicazione.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale composito leggero e resistente.
Aste montanti per stabilizzazione latero/mediale conformate anatomicamente.
Imbottitura traspirante, bifoderata in gomma schiuma.
Imbottitura plantare in evazote atossica.
Cinturini di chiusura a velcro.
Suola in gomma antiscivolo.

INDICAZIONI

ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE • TRATTAMENTO DELLE FRATTURE MALLEOLARI • SOSTITUTIVO DEL GESSO • POST-OPERATORIO.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini a velcro di chiusura.
 - 2 Indossare l'imbottitura.
 - 3 Infilare la gamba all'interno della struttura plastica.
 - 4 Stringere i cinturini di chiusura partendo da quello più basso (piede).
- * Se necessario, asportare la parte scheletrica antero-posteriore.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

* solo per tecnico specializzato

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data
27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com