

Tutore AFO per piede equino (ciondolante).

SPRINGY

ART. TO4302

La cura del piede in tutta sicurezza, leggera e confortevole.

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in un particolare mix di materiali plastici, la pratica chiusura a velcro, fanno di questo tutore la soluzione immediata alle necessità quotidiane. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma anatomicamente avvolgente, assicura la giusta spinta nelle attività giornaliere.

CARATTERISTICHE

- Struttura plastica anatomicamente avvolgente
- Imbottitura di protezione al polpaccio
- Chiusura a velcro.
- Se strettamente necessario, modificabile a caldo.

INDICAZIONI

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE • EQUINISMI SPASTICI DI MEDIA ENTITA'.

APPLICAZIONE

1. Infilare il tutore nella calzatura.
2. Indossare la scarpa con il tutore.
3. Avvolgere l'imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio.
4. Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino a velcro.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L' applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data
27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com