



Tutore AFO per piede equino (ciondolante) con fibra di carbonio.

## SPRINGY PLUS

Art. TO4302C

**La cura del piede in tutta sicurezza,  
leggera e confortevole.**

### DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in un particolare mix di materiali plastici, la pratica chiusura a velcro, fanno di questo tutore la soluzione immediata alle necessità quotidiane. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma anatomicamente avvolgente, assicura la giusta spinta nelle attività giornaliere.

### CARATTERISTICHE

Struttura plastica anatomicamente avvolgente  
Imbottitura di protezione al polpaccio  
Chiusura a velcro.  
Se strettamente necessario, modificabile a caldo.

### INDICAZIONI

CADUTE FLACCIDE DEL PIEDE • EQUINISMI SPASTICI DI MEDIA ENTITA'.

### APPLICAZIONE

- 1 Infilare il tutore nella calzatura.
- 2 Indossare la scarpa con il tutore.
- 3 Avvolgere l'imbottitura sulla gamba a livello del polpaccio.
- 4 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato e stringere il cinturino a velcro.

### MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.  
Asciugare lasciando lontano da fonti di calore.  
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.  
Non disperdere nell'ambiente.

### PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.  
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.  
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

### AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.  
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.  
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

### GARANZIA

Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto.

Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione.

Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura.

TENORTHO SRL UNIPERSONALE  
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)  
Tel. +39 039 8943960  
Fax. +39 039 8943689  
www.tenortho.com  
info@tenortho.com

Presenza di marcatura CE, che attesta  
la conformità alla direttiva europea  
93/42/CEE.

Emissione in data 01 - 12 - 2016  
Revisione 0

