



Tutore per alluce valgo.

VALGOTEN

Art. TO4303

**La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole. Il design innovativo, la struttura realizzata in materiale plastico composito e le chiusure a velcro, fanno di questo tutore la soluzione immediata alla cura dell'alluce. Facile da indossare, ottima vestibilità grazie alla forma avvolgente ed anatomica, assicura l'immobilizzazione necessaria e procura benessere e sollievo nelle attività quotidiane.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale plastico composito.
Stecca in alluminio presagomata, modellabile.
Chiusura a velcro elastico.

INDICAZIONI

TENDINITI • TENDINOPATIA DI DE QUERVAIN • RIZARTROSI • POSTUMI DI FRATTURA DI BENNET • LESIONE DI STEINER • POST OPERATORIO.

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini in velcro.
- 2 Infilare l'alluce nella stecca mantenendo il semicerchio internamente.
- 3 Assicurarsi che il tutore sia ben posizionato.
- 4 Stringere la fascia bianca imbottita, fino a raggiungere con la stecca il centro del dorso del piede e chiudere il cinturino blu, applicando la tensione desiderata.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente.
Asciugare lontano da fonti di calore.
Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire.
Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni.
Rivolgersi al tecnico ortopedico, nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione.
Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia e la tollerabilità e il corretto funzionamento.
Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto.
Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data
27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com