



Ortesi rigida a stivaletto

AGILE EASY

Art. TO4305

**La cura del piede in tutta sicurezza,
leggera e confortevole.**

DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico, leggero e confortevole, garantisce la necessaria stabilizzazione dell'articolazione tibio-tarsica. La struttura caratterizzata da materiali plastici, resistenti e leggeri, garantiscono un'ottima tenuta latero-mediale. Adattabile a qualsiasi conformazione anatomica, risulta di facile applicazione.

CARATTERISTICHE

Struttura in materiale composito leggero e resistente. Aste montanti per stabilizzazione latero/mediale conformate anatomicamente. Imbottitura traspirante, bi-foderata in gomma schiuma, rivestita da velour di cotone. Imbottitura plantare in Evazote® atossica. Cinturini di chiusura a velcro. Suola in gomma antiscivolo.

INDICAZIONI

ROTTURA DEL TENDINE D'ACHILLE • TRATTAMENTO DELLE FRATTURE MALLEOLARI • SOSTITUTIVO DEL GESSO • POST-OPERATORIO

APPLICAZIONE

- 1 Aprire i cinturini a velcro di chiusura.
- 2 Indossare l'imbottitura.
- 3 Infilare la gamba all'interno della struttura plastica.
- 4 Stringere i cinturini di chiusura partendo da quello più basso (piede).
- 5 Rimuovere le bande di protezione per consentire al velcro di agganciare le aste montanti.

MANUTENZIONE

Lavare a mano in acqua tiepida con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere prescritto dal medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità.

* solo per tecnico specializzato

Presenza di marcatura CE, che attesta la conformità alla direttiva europea 93/42/CEE.

Emissione in data Emissione in data
27 - 04 - 2016
Revisione 0



TENORTHO SRL UNIPERSONALE
Via Locatelli 82, 20853 Biassono (MB)
Tel. +39 039 8943960 Fax. +39 039 8943689
www.tenortho.com – info@tenortho.com