



LINEA G+ DORSO-LOMBARE

Ref. TO1205 Corsetto semirigido dorso-lombare in grafene



DESCRIZIONE

Supporto medico-ortopedico di ultima generazione, unico nel suo genere. Il design innovativo, la struttura realizzata in tessuto con membrana in grafene garantisce semi rigidità.

Gli spillacci e gli speciali tiranti elastici appositamente studiati per garantire una trazione facilitata e controllata, lo rendono necessario nel controllo di patologie della schiena. Facile da indossare, assicura il corretto sostegno alla schiena e procura benessere e sollievo.

CARATTERISTICHE

- Materiale con membrana in grafene, antistatico (le speciali fibre conduttive assorbono e disperdono le cariche elettriche); traspirante; batteriostatico e ipoallergenico, performante; termoregolatore.
- Chiusura anteriore a velcro.
- Sistema di tiranti elastici posteriori, posizionati a forma di rombo per seguire la muscolatura della schiena. I tiranti convergono in un unico tirante per una pressione variabile e personalizzata.
- Parte lombare sostenuta da stecche modellabili integrate nella fascia.
- Zona addominale con rinforzo steccato a spirale in posizione obliqua.
- Altezza anteriore 23 cm. Altezza posteriore 53 cm.

DESTINAZIONE D'USO

Dispositivi medici non invasivi terapeutici atti a correggere problemi posturali.

INDICAZIONI

Dorsalgie su base artrosica o da cifosi • fratture vertebrali dorsali e lombari alte ed esiti • cedimenti vertebrali dorsali su base osteoporotica o metastatica.

APPLICAZIONE

Non indossare il tutore a pelle.

1. Aprire il corsetto completamente.
2. Zona anteriore costituita da n°3 velcri (1 addominale "grande", 2 laterali "piccoli").
3. Inizialmente posizionare i velcri dei tiranti fissandoli sul vellutino laterale.
4. Indossare il corsetto e chiudere il velcro "addominale grande" quanto basta per stabilizzarlo correttamente.
5. Prendere i velcri dei tiranti e tirarli fino a raggiungere il velcro grande addominale e fissarli centralmente.
6. Fissare prima i velcri dei tiranti inferiori e successivamente quelli dei tiranti superiori.
7. Per applicarlo correttamente, assicurarsi che il bordo posteriore inferiore del corsetto, sia posizionato a metà glutei.
8. Far passare i tiranti delle spalline sopra le spalle, quindi sotto le ascelle, incrociarli posteriormente e infine fissarli sul velcro dei tiranti superiori/anteriori.



Tenortho
Get back in action

via Trento e Trieste, 100
20853 Biassono (MB)

Italy



tenortho.com

✉ info@tenortho.com

☎ +39 039 8943960

f tenortho



LINEA G+ DORSO-LOMBARE

Ref. TO1205 Corsetto semirigido dorso-lombare in grafene



POPOLAZIONE E LIMITAZIONI D'IMPIEGO

Gli ausili di Tenortho sono generalmente indicati per l'impiego su soggetti adulti oltre i 12 anni d'età. Utilizzare il prodotto solamente per le destinazioni d'uso indicate (v. foglio istruzioni, sezione "indicazioni"). Alcuni dispositivi che presentano una gamma di taglie pediatriche o realizzati in "su misura" possono comunque trovare applicazione anche in soggetti a partire dai 3 anni. Si raccomanda cautela ed il preventivo ricorso al parere di un medico, nell'impiego in donne in gravidanza per tutti gli ausili che possono presentare interferenze con il ventre materno (collari con stabilizzatore sterno-dorsale, cinture lombari, busti, corsetti, tutori di spalla e di anca...). Allo stesso modo, particolare attenzione ed una attenta valutazione medica, va dedicata all'impiego di tutori che possono interferire con la respirazione nei pazienti che presentano patologie o difficoltà respiratorie (iperestensori, busti, corsetti, collari, tutori di spalla...). Il prodotto che include la magnetoterapia (TO1308MG TENOMAG) non deve essere impiegato in donne in gravidanza né in soggetti portatori di dispositivi impiantabili (pacemaker, defibrillatori o impianti fissi). Riferirsi alle istruzioni d'uso del fabbricante del dispositivo di magnetoterapia.

MANUTENZIONE

Rimuovere prima del lavaggio, se possibile, le steccature e i telai metallici eventualmente presenti. Lavare a mano in acqua tiepida, con sapone neutro; risciacquare accuratamente. Asciugare lasciando lontano da fonti di calore. Rivolgersi al proprio tecnico ortopedico, in caso di problemi o componenti usurate da sostituire. Non disperdere nell'ambiente.

PRECAUZIONI D'USO

Il dispositivo non deve creare pressioni su parti del corpo che presentano ferite, gonfiori o tumefazioni. Rivolgersi al tecnico ortopedico nel caso ci fossero dubbi sull'applicazione. Non indossare il dispositivo in vicinanza di fiamme libere.

SORVEGLIANZA SANITARIA

Nell'ottica di una continua sorveglianza sanitaria per garantire la miglior sicurezza dell'impiego dei prodotti Tenortho, si prega di segnalare qualsiasi grave effetto avverso insorto durante l'impiego del prodotto inviando una mail all'indirizzo: ufficiotecnico@tenortho.com

Segnalare inoltre l'evento alle Autorità competenti.

AVVERTENZE

Il dispositivo deve essere utilizzato su indicazione del medico e applicato da un tecnico ortopedico, che è la figura competente di riferimento sia per l'applicazione sia per le informazioni ad un uso sicuro. L'applicazione deve essere effettuata con la massima cura, così da garantire l'efficacia, la tollerabilità e il corretto funzionamento. Eventuali modifiche strutturali o di altro genere devono essere decise dal medico ed eseguite dal tecnico ortopedico. Si consiglia l'uso personale del prodotto. Il contatto diretto del dispositivo con la pelle potrebbe causare rossori o irritazioni a persone molto sensibili. Non posizionare il prodotto su cute lesa. Rivolgersi immediatamente al proprio medico in caso di intollerabilità. Potrebbe contenere tracce di Nickel pari allo 0,0015% in peso.

SMALTIMENTO

Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo alle leggi vigenti in materia di rifiuti del proprio comune e/o Stato membro. Il prodotto non presenta rischi di contaminanti.

GARANZIA


Tenortho certifica la corretta costruzione del prodotto, l'impiego di materiali di prima qualità, l'effettuazione di tutti i collaudi necessari e la sua aderenza alle norme e leggi vigenti. Tenortho si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Prodotti a lui imputabile, verificatosi entro 6 (sei) mesi dalla consegna dei Prodotti e comunicato tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla scoperta del vizio o del difetto. Tenortho potrà scegliere se riparare o sostituire i Prodotti risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia di 6 (sei) mesi a partire dalla riparazione o sostituzione. Sono esclusi dai difetti di conformità e, dunque, dalla garanzia legale, eventuali vizi o danneggiamenti determinati da fatti accidentali o da responsabilità dell'Utente (quali, a titolo semplificato e non esaustivo, l'incuria, la mancata o errata pulizia) o da uso dei Prodotti non conforme alla relativa destinazione d'uso, ovvero da normale usura. Conservare confezioni, etichette e scontrino d'acquisto per garantire la corretta tracciabilità del lotto.



Lavare a mano
in acqua tiepida



Non mettere
in asciugatrice

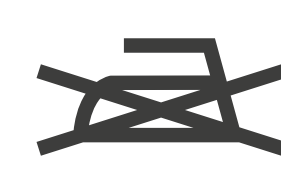

Non stirare



Non candeggiare



Prodotto conforme al regolamento UE 745/2017 - Emissione in data 04/2021 - Rev.0
Azienda certificata: sistema di qualità certificato secondo ISO 9001:2015 ed ISO 13485:2016



Fabbricante

REF

Codice prodotto

LOT

Numero lotto



Dispositivo Medico